



**ELITE-SPK**

**I M P I A N T O  
T R A N S O S S E O  
P E R L A  
R I P A R A Z I O N E  
A R T R O S C O P I C A  
D E L L E  
L E S I O N I  
D E L L A C U F F I A  
D E I R O T A T O R I**



**INNOVATIVO**

Piattaforma open.

**VERSATILE**

Uso artroscopico e mini-open.

**SICURO**


Previene il fenomeno del bone cutting.

L'impianto di Elite-SPK consente la riparazione delle lesioni alla cuffia dei rotatori per via transossea in completa libertà chirurgica, avendo la possibilità di scegliere tra l'approccio artroscopico e mini open, applicabili entrambi senza incorrere nel fenomeno del "bone cutting".

L'utilizzo di un solo impianto Elite-SPK crea una superficie di contatto tra tendine ed osso che conferisce un'efficacia biomeccanica comparabile alle tecniche gold standard:

- La forma caratteristica di Elite-SPK e le sue proprietà lo rendono una piattaforma per suture ideale per l'approccio transosseo, consentendo l'impianto su tessuto osseo anche molto fragile ed eliminando i rischi di migrazione e pull-out.
- La sua applicazione inoltre permette di effettuare un'ampia decorticazione della zona di footprint, pur mantenendo la massima tenuta ossea.
- La speciale geometria di Elite-SPK è pensata per l'utilizzo di fino a 3 suture sullo stesso dispositivo, per consentire un'uguale distribuzione delle forze sui tendini lesionati.

#### ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DELLE SUTURE

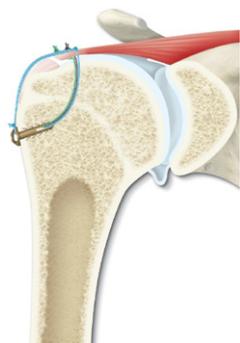

TRANSOSSEO AUMENTATO



2MC




CAVO AUMENTATO

#### RAPIDITÀ DI IMPIANTO E STRUMENTARIO DEDICATO


REALIZZARE IL TUNNEL TRANSOSSEO CON LO STRUMENTARIO DEDICATO.



CARICARE LE SUTURE SU ELITE-SPK E COLLOCARE L'IMPIANTO SULL'APPOSITO INSERITORE.

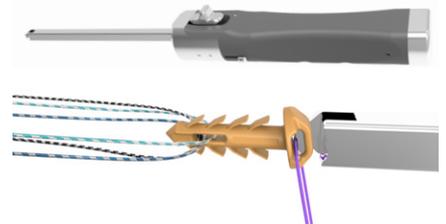

SPINGERE ELITE-SPK NEL FORO TRANSOSSEO, SGANCIARE L'INSERITORE, QUINDI REALIZZARE LA RIPARAZIONE SCEGLIENDO LA CONFIGURAZIONE DI SUTURA PIÙ APPROPRIATA.

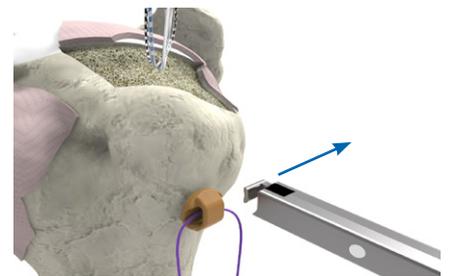

CODICE	CND	RDM	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PACKAGE
C000508	P09120102	1250679	Elite-SPK	1	Sterile
A000115	/	102103	Elite-SPK KIT: 1 x Elite-SPK (cod. C000508) 3 x Suture HS Fiber USP 2-Metric 5 Senza Ago (cod. HSe-2G/2C/2K-NN)*	1	Sterile y Rays Sterile EO
P005_AS034_13	K0399	1220833	Inseritore Elite-SPK	1	Non sterile
<b>CLASSE DI RISCHIO DI ELITE-SPK</b>		IIB			
<b>MATERIALE DI ELITE-SPK</b>		Peek			

\*Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.



NCS Lab Srl.  
Via Pola Esterna 4/12 - 41012 Carpi (MO) Italy  
pIVA 025500410202 | Tel. +39 059 669813 | [biomed@ncs-lab.com](mailto:biomed@ncs-lab.com)