

POSIZIONARE ELITE-SPK® SULL'INSERITORE

► Inserire all'interno dell'asola posteriore del dispositivo Elite-SPK® una sutura temporanea Vicryl o in PSD USP 0 e pareggiare i due capi del filo.


TIP! Le suture shuttle non conferiscono stabilità alla riparazione e vengono rimosse al completamento del costruito.

► Agire sul pomello dello strumento far avanzare il dente mobile.

► Inserire l'asola posteriore di Elite-SPK® nel dente mobile dell'inseritore.

⚠ ATTENZIONE! Utilizzare le marcature laser per inserire il dispositivo nel verso corretto. Il dispositivo e la cannula dell'inseritore devono risultare allineati.

► Retrarre il pomello, bloccare il sistema utilizzando il perno laterale e caricare le suture nell'asola distale di Elite-SPK®.

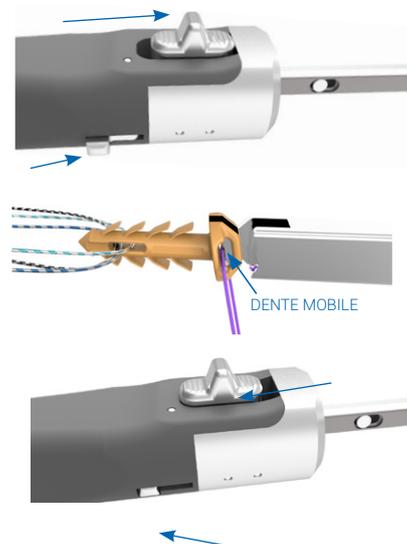


ESEGUIRE LA RIPARAZIONE CON ELITE-SPK®

► Annodare le estremità di ciascuna sutura al filo shuttle passante attraverso il tunnel transosseo.

NOTA! Tirare lo shuttle dal foro superiore. Nel caso siano stati usati più fili shuttle, per un transito più scorrevole far passare le suture una ad una attraverso il tunnel transosseo.

Si consiglia di usare un portale d'accesso para-acromiale per portare a termine più agevolmente il trascinarsi del filo shuttle e delle suture ad alta resistenza.

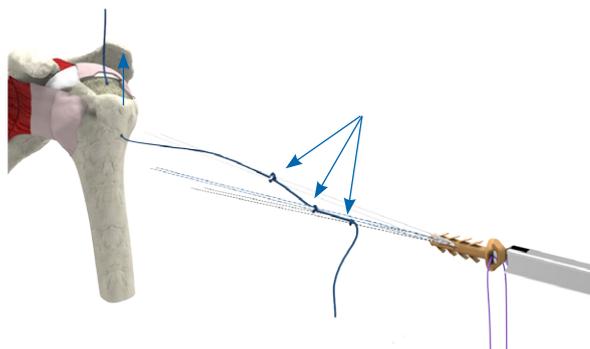

► Mantenere Elite-SPK® coassiale rispetto al foro d'ingresso, mantenere le suture tese dall'alto per agevolare l'inserimento e far avanzare l'impianto attraverso il deltoide.

NOTA! Applicare una leggera pressione o tensione sul retro dell'inseritore per agevolare il passaggio dell'impianto.

► Posizionare Elite-SPK® sulla corticale laterale dell'omero. Se è stato realizzato, utilizzare l'alloggiamento creato con il punzone per guidare l'ingresso del dispositivo.

► Inserire completamente il corpo di Elite-SPK® all'interno dell'omero facendo aderire il sottotesta di appoggio alla corticale laterale.


NOTA! Potrebbe essere necessario l'utilizzo delicato del martello.

► Sbloccare il perno laterale dell'inseritore e spingere il pomello in avanti per rilasciare Elite-SPK® quindi far scorrere lateralmente l'inseritore per rimuoverlo.

► Suturare la cuffia dei rotatori utilizzando la configurazione più appropriata.



⚠ ATTENZIONE! Non affondare l'impianto nella corticale!

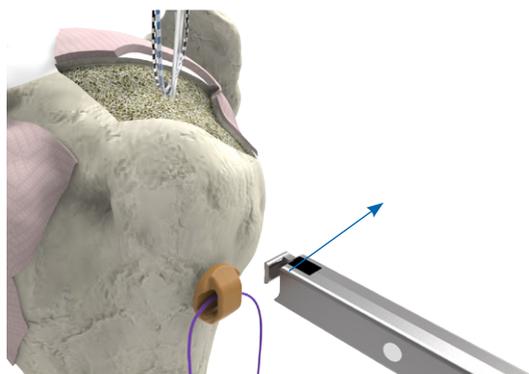

POSIZIONARE SHARC-FT® SULL'INSERITORE

► Inserire all'interno dell'asola posteriore del dispositivo Sharc-FT® una sutura temporanea Vicryl o in PSD USP 0 e pareggiare i due capi del filo.


TIP! Le suture shuttle non conferiscono stabilità alla riparazione e vengono rimosse al completamento del costruito.

► Agire sul pomello dello strumento far avanzare il dente mobile.

► Inserire l'asola posteriore di Sharc-FT® nel dente mobile dell'inseritore.

⚠ ATTENZIONE! Utilizzare le marcature laser per inserire il dispositivo nel verso corretto. Il dispositivo e la cannula dell'inseritore devono risultare allineati.

► Rilasciare il pomello per consentire il blocco del dispositivo e caricare le suture nell'asola anteriore di Sharc-FT®.

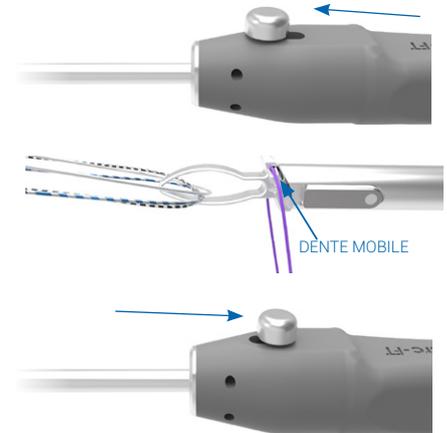

ESEGUIRE LA RIPARAZIONE CON SHARC-FT®

► Annodare le estremità di ciascuna sutura al filo shuttle passante attraverso il tunnel transosseo.

NOTA! Tirare lo shuttle dal foro superiore. Nel caso siano stati usati più fili shuttle far passare le suture una ad una attraverso il tunnel transosseo, per un transito più scorrevole.

Si consiglia di usare un portale d'accesso para-acromiale per portare a termine più agevolmente il trascinarsi del filo shuttle e delle suture ad alta resistenza.

► Mantenere Sharc-FT® coassiale rispetto al foro d'ingresso, mantenere le suture tese dall'alto per agevolare l'inserimento e far avanzare l'impianto attraverso il deltoide.

NOTA! Applicare una leggera pressione o tensione sul retro dell'inseritore per agevolare il passaggio dell'impianto.


► Posizionare Sharc-FT® sulla corticale laterale dell'omero. Se è stato realizzato, utilizzare l'alloggiamento creato con il punzone per guidare l'ingresso del dispositivo.

► Inserire completamente il corpo di Sharc-FT® all'interno dell'omero facendo aderire il sottotesta di appoggio alla corticale laterale.

NOTA! Potrebbe essere necessario l'utilizzo delicato del martello.

► Una volta posizionato Sharc-FT® far avanzare il pomello dell'inseritore e scorrere lateralmente lo strumentario per rimuoverlo.

► Suturare la cuffia dei rotatori utilizzando la configurazione più appropriata.

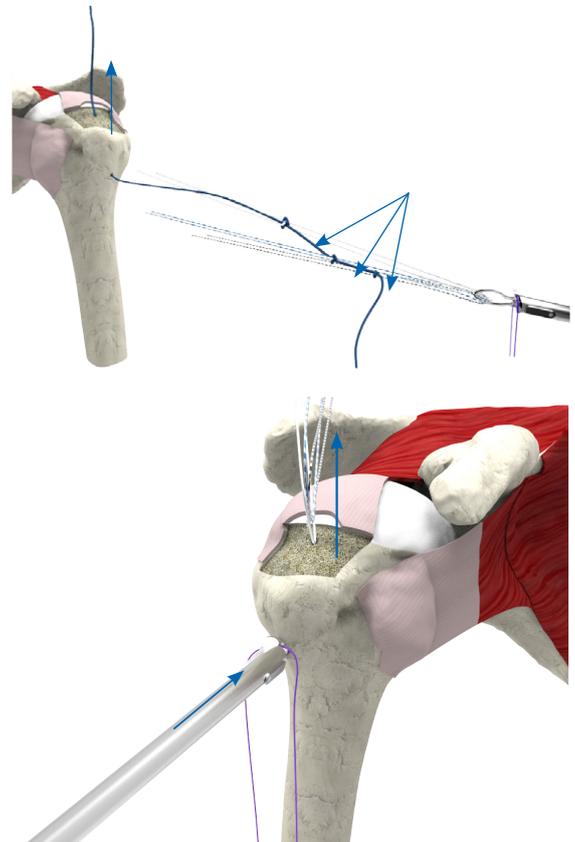

⚠ ATTENZIONE! Non affondare l'impianto nella corticale!

