



SHARC-FT

**I M P I A N T O
T R A N S O S S E O
P E R L A
R I P A R A Z I O N E
A R T R O S C O P I C A
D E L L E
L E S I O N I
D E L L A C U F F I A
D E I R O T A T O R I**



INNOVATIVO

Piattaforma open.

VERSATILE

Uso artroscopico e mini-open.

SICURO


Previene il fenomeno del bone cutting.

L'impianto di Sharc-FT consente la riparazione delle lesioni alla cuffia dei rotatori per via transossea in completa libertà chirurgica, avendo la possibilità di scegliere tra l'approccio artroscopico e mini open, applicabili entrambi senza incorrere nel fenomeno del "bone cutting".


L'utilizzo di un solo impianto Sharc-FT crea una superficie di contatto tra tendine ed osso che conferisce un'efficacia biomeccanica comparabile alle tecniche gold standard:

- La forma caratteristica di Sharc-FT e le sue proprietà lo rendono una piattaforma per suture ideale per l'approccio transosseo, consentendo l'impianto su tessuto osseo anche molto fragile ed eliminando i rischi di migrazione e pull-out.
- La meccanica del suo funzionamento inoltre permette di effettuare un'ampia decorticazione della zona di footprint, pur mantenendo la massima tenuta ossea.
- La speciale geometria di Sharc-FT è pensata per l'utilizzo contemporaneo fino ad un massimo di 3 suture sullo stesso dispositivo, per consentire un'uguale distribuzione delle forze sui tendini lesionati.


ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DELLE SUTURE CON IL DISPOSITIVO SHARC-FT

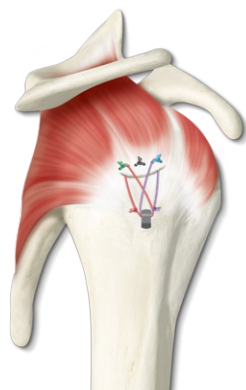

SHARC-FT + 2

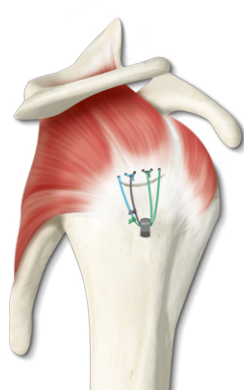

2MC

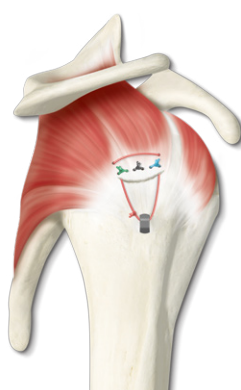


CAVO AUMENTATO

RAPIDITÀ DI IMPIANTO E STRUMENTARIO DEDICATO

REALIZZARE IL TUNNEL TRANSOSSEO CON LO STRUMENTARIO DEDICATO.



CARICARE LE SUTURE SU SHARC-FT E COLLOCARE L'IMPIANTO SULL'APPOSITO INSERITORE.

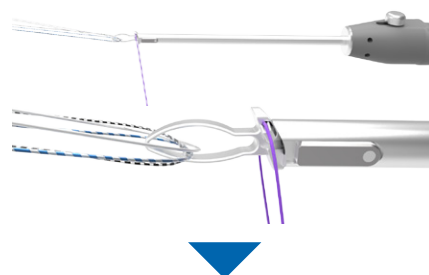

SPINGERE SHARC_FT NEL FORO TRANSOSSEO, SGANCIARE L'INSERITORE, QUINDI REALIZZARE LA RIPARAZIONE SCEGLIENDO LA CONFIGURAZIONE DI SUTURA PIÙ APPROPRIATA.



CODICI PRODOTTO

CODICE	CND	RDM	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PACKAGE
P005_AS014	P09120102	393320	1 x Sharc-FT	1	Sterile γ Rays
P005_AS034_02	K0399	900954	Inseritore Sharc-FT	1	Non sterile
PRODUTTORE	ENTE CERTIFICANTE	CLASSE DI RISCHIO	MATERIALE SHARC-FT	STERILIZZ.	DURATA
NCS Lab Srl.	KIWA-CERMET	IIB	Titanio grado 4	Raggi γ	5 anni sigillato

CODICI KIT

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PACKAGE
P005_AS050	47863	Sharc-FT KIT: 1 x Sharc-FT (Cod. P005_AS014) 2 x Suture HS Fiber USP 2-Metric 5 Senza Ago (cod. HSe-2G/2K-NN)*	1	Sterile
PRODUTTORE SUTURE	ENTE CERTIFICATORE			SCADENZA
Riverpoint Medical per NCS Lab Srl.	LNE/G-MED			5 anni sigillato

*Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.



NCS Lab Srl.
Via Pola Esterna 4/12 - 41012 Carpi (MO) Italy
pIVA 025500410202 | Tel. +39 059 669813 | biomed@ncs-lab.com